


ALKOHOL-ATEMTESTER MIT TASCHENLAMPE

Artikelnummer: 865858

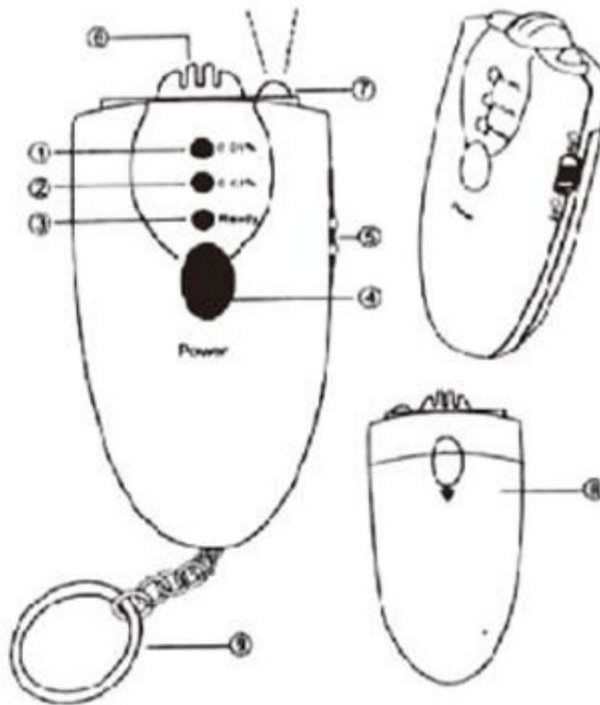

- (1) Rote LED
- (2) Gelbe LED
- (3) Grüne LED
- (4) POWER-Taste
- (5) Taschenlampen Schalter
- (6) Atemsensor
- (7) Taschenlampe
- (8) Batteriefach
- (9) Schlüsselanhänger

Bedienungsanleitung

Merkmale

1. 3-stufiger Alkoholtest
2. Schnelle Reaktion und Fortsetzung
3. Taschenlampe (orangefarbene LED)
4. Schlüsselanhänger
5. Verwenden Sie zwei hochwertige 1,5-V-Alkalibatterien vom Typ „AAA“ (UM-4).

Installation und Austausch der Batterie

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie zwei hochwertige Alkalibatterien vom Typ „AAA“ (UM-4) (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität ein, wie angegeben.

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
4. Wenn die LED-Anzeigen des Alkoholtesters oder das Licht der Taschenlampe schwach werden, ersetzen Sie diesen mit neuen Batterien.

Alkoholtest

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Die grüne LED leuchtet nach etwa 10 Sekunden und zeigt „BEREIT“ an. Das Gerät wechselt in den Test-Modus.
2. Warten Sie etwa 10 Sekunden und atmen Sie dann nach tiefen Einatmen in etwa 3 cm Entfernung mit normaler Kraft in den Atemsensor aus. Sehen Sie sich das Testergebnis (Alkoholgehalt des Benutzers: BAC*) wie folgt an:
 - Grüne LED leuchtet weiter: Sicherheit – unter 0,02 % BAC (oder 0,10 mg/L BRAC).
 - Gelbes LED-Licht: Achtung – 0,02 % BAC (oder 0,10 mg/L BRAC) BIS 0,05 % BAC (oder 0,25 mg/L BRAC).
 - Rote und gelbe LEDs leuchten: Gefahr – über 0,05 % BAC (oder 0,25 mg/L BRAC).

Taschenlampenfunktion

1. Stellen Sie den Taschenlampen Schalter auf die Position <ON>, um die Taschenlampe einzuschalten. Bitte verzichten Sie auf die Alkoholtest Funktion in diesem Modus.
2. Benutzen Sie während des Alkoholtests keine Taschenlampe.

Notiz

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während des Alkoholtests die POWER-Taste gedrückt halten.
2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, leuchten die roten und gelben LEDs während des Alkoholtests lange weiter, da das Gerät mehr Zeit zum Aufwärmen benötigt. Bitte drücken Sie die POWER-Taste mehrmals und wiederholt, bis es funktioniert.
3. Wenn die Batterieleistung gering ist, leuchten die roten und gelben LEDs während des Alkoholtests lange weiter. Bitte ersetzen Sie die Batterien sofort durch neue.
4. Nach dem Trinken wird empfohlen, 20 Minuten bis zum Testen zu warten. Denn es dauert ungefähr 20 Minuten bis der Alkohol von den Verdauungsorganen ins Blut aufgenommen wird, und der im Mund verbliebene Restalkohol braucht so lange, um sich zu verflüchtigen.
5. Um ein genaues Ergebnis zu erzielen, wiederholen Sie den nächsten Test nicht innerhalb von 3 Minuten
6. Rauchen und essen Sie einige Minuten vor dem Test nicht.
7. Verwenden Sie keine Chemikalien, um den Tester direkt zu reinigen. Blasen Sie keine Flüssigkeit in den Atemsensor.
8. Bringen Sie keine erregenden Substanzen in die Nähe des Testers. Wie Farben, Insektizide, Alkohole usw.
9. Platzieren Sie den Tester nicht in einer geschlossenen Umgebung mit kontaminierter Luft.

Haftungsausschluss

Der Tester gibt BAC(BRAC) nur als Referenz an, der Hersteller übernimmt hierfür keine rechtliche Verantwortung

*BAC: Blutalkoholkonzentration.