

## BEOOGD GEBRUIK:

- De BV-72 beschermt uw baby of peuter tegen de schadelijke invloeden van hoogfrequente geluiden zoals het geluid dat afkomstig is van muziek-installaties, werkplaatsuitrusting, tuingereedschap met motor etc.
- De BV-72 gehoorkap is geschikt voor baby's en peuters van 18 maanden en ouder.
- De gehoorkap is niet geschikt voor opgroeiende kinderen of volwassenen.
- De BV-72 wordt inclusief 3 verschillende hoofdbandjes geleverd die elk voorzien zijn van een klittenbandsluiting. Deze gehoorbescherming is daardoor geschikt voor vrijwel elk formaat kinderhoofdje.
- Als het bandje niet meer gesloten kan worden met de klittenband zonder het bandje uit te trekken, gebruik dan een groter bandje.
- De ouder of begeleider van de baby of peuter dient ervoor te zorgen dat de oorbeschermer wordt gedragen, afgesteld en onderhouden in overeenstemming met de instructies van deze gebruiksaanwijzing en dat de oorbeschermer regelmatig wordt gecontroleerd op bruikbaarheid.

## GEBRUIK:

1. Bepaal eerst welk van de 3 bijgeleverde hoofdbandjes ROYAAL rond het hoofdje van uw baby of peuter past waarbij het bandje met behulp van de klittenband gesloten kan worden, zonder dat de band uitgetrokken hoeft te worden. Houd er alvast rekening mee dat straks de oorkappen er nog tussen moeten.
2. Leg het hoofdbandje vervolgens op de 2 opengeklapte oorkappen en zet het bandje vast door de oorkappen te sluiten. Sluit de kappes van de oorkappen en druk deze goed aan.
3. Plaats nu de oorkappen over de oortjes van uw baby of peuter. U kunt de oorkappen op de band verschuiven zodat u de kappen goed over de oren kunt positioneren. Zorg daarbij dat het hoofdbandje de vorm van het hoofdje volgt zonder los te hangen of strak te zitten. Laat de band rond het voorhoofdje lopen, en niet voor de ogen, mond of neus.
4. Sluit tot slot het bandje met behulp van de klittenband.

Zorg dat het bandje NOOIT strak om het hoofdje zit. Sluit het bandje met de klittenband zodanig dat het bandje net op zijn plaats blijft en niet naar beneden zakt.

Doe de gehoorbeschermer bij uw baby of peuter altijd om voordat hij of zij wordt blootgesteld aan lawaai en laat deze gedurende de gehele duur van de blootstelling aan lawaai zitten.

Controleer tijdens het gebruiken regelmatig of de gehoorcapen nog goed over de oortjes gepositioneerd zitten. Met name haren en kledingstukken zoals mutsjes of koordjes kunnen de oorzaak zijn dat de oorkappen de oortjes niet goed afsluiten.

Gebruik de oorkappen niet langer dan 60 minuten aaneengesloten en niet langer dan 2,5 à 3 uur verspreid over de dag.

De BV-72 is geen speelgoed. Berg, na gebruik van de gehoorbeschermer, deze altijd op een schone, droge en veilige plaats op. Laat uw baby of peuter nooit alleen met de gehoorbeschermer.

De gebruiksduur van de BV-72 bedraagt, onder normale omstandigheden en gebruik, 4 jaar na eerste ingebruikname.

Deze oorkappen zijn van klein formaat. Gehoorcapen die voldoen aan EN 352-1 vallen in een 'middelgroot bereik', 'klein formaatbereik' of 'groot formaatbereik'. Oorbeschermers van gemiddelde grootte passen op de meeste dragers. Gehoorcapen van klein formaat zijn ontworpen voor dragers voor wie de gehoorcapen van het "middelgrote assortiment" niet geschikt zijn. Maat is heeft een hoofdomtrek van 35 - 53 cm.

**WAARSCHUWING:** De gehoorcapen, en in het bijzonder de kussens, kunnen slijten bij gebruik en moeten vóór elk gebruik worden gecontroleerd op bijvoorbeeld scheuren en lekken. Bij een beschadiging van het kussen van een gehoorkap, moet de gehele gehoorkap vervangen worden. De kussens zijn niet afneembaar en niet vervangbaar.

## REINIGING & DESINFECTIE:

- De hoofdbandjes kunt u op 30 of 40 graden in de wasmachine wassen. Doe de bandjes wel eerst in een waszak om de overige was niet te beschadigen.
- De bandjes zijn NIET geschikt voor in de droogtrommel.
- De witte schelpen van de oorkappen en de zwarte kunststof kussens kunt u met een zachte vochtige doek reinigen.
- Het deel van de zwarte kunststof kussens dat in contact komt met de huid van uw baby of peuter, moet regelmatig worden gedesinfecteerd met een product als zeepwater, optische reinigingsoplossing, of een oplossing met een zeer laag alcoholpercentage. Afhankelijk van het gebruik is het noodzakelijk om het product elke 3 maanden te desinfecteren.
- De oorkappen niet in water onderdompelen.

## VERKLARING VAN CONFORMITEIT:

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat de Alecto BV-72 conform is met richtlijn (EU)2016/425 door middel van de Europese norm EN352-1:2002. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/BV-72-DOC.pdf>

## SPECIFICATIES:

Gebruikt materiaal: Oorkappen: ABS met PU/PVC kussens  
 Hoofdbandjes: polyester  
 Constructie: Polyester hoofdband met klittenbandsluiting  
 Leeftijd: Geschikt voor baby's en peuters van 18+ maanden.

## Dempingswaarde:

Weight 126g	Frequency (Hz)							
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Average (dB)	16.00	16.90	23.80	31.40	29.50	39.60	42.80	
Standard deviation (dB)	3.20	3.70	3.20	3.60	3.80	3.60	3.40	
APV (dB)	12.80	13.20	20.60	27.80	25.70	36.00	39.40	
	M(dB)	29	M(dB)	23	L(dB)	17	SNR(dB)	26

Deze dempingswaarden worden alleen gehaald als de oorkappen volgens de in deze handleiding beschreven wijze onderhouden en gedragen worden.

Dit model gehoorcap voldoet aan de optionele eisen bij +50 °C en -20 °C.

## Fabrikant:

Hesdo bv. Aziëlaan 12, 5232 BA,  
 's-Hertogenbosch, The Netherlands

## EG Certificaat:

PZT GmbH, Bismarckstrasse 264  
 D - 26389 Wilhelmshaven,  
 Deutschland - Germany  
 Notified Body NO: 1974

Service  
 Help

HSC

[support.alectobaby.nl](http://support.alectobaby.nl)

**Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,  
 's-Hertogenbosch, The Netherlands**

# CE 1974

EN352-1 : 2002 Hearing protectors-Part 1: Ear-muffs